

## ISTRUZIONI PER L'USO

Le presenti istruzioni per l'uso forniscono all'utilizzatore, in accordo al Reg. UE 2017/745, le informazioni relative alla destinazione d'uso ed all'uso corretto del dispositivo medico sottoindicato e le eventuali precauzioni da adottare:

|   |  |
|---|--|
| Nome commerciale                                    | <b>CUSCINO PILLOW HIGH LATTICE 6.0</b>   |
| Codice del prodotto                                 | C.LQUPX2SL6#42X72  |
| Tipologia del prodotto                              | <b>Guanciale</b>   |
| Destinazione d'uso                                  | Guanciale ad esclusivo utilizzo per il riposo e per il sonno.<br><br>L'utilizzo del guanciale come cuscino di seduta - ad esempio su sedie, poltrone, sedie a rotelle, ecc. - costituisce uso non previsto ed esula dalle funzioni cliniche per cui il dispositivo è concepito.  |
| Benefici clinici attesi                             | Guanciale idoneo ad essere utilizzato come ausilio di prevenzione statica di difetti posturali del collo durante il sonno o il riposo a letto, attraverso l'ottimizzazione della disposizione vertebrale e il rilassamento della muscolatura del collo.  |
| Caratteristiche di prestazione                      | Si raccomanda di scegliere l'altezza del cuscino in base alla posizione di riposo (supina, prona o sul fianco) ed alle proprie caratteristiche corporee: si suggerisce una prova pratica preliminare per la scelta dell'altezza.   |
| Specifiche di adeguato utilizzo e controindicazioni | Guanciale riservato all'utilizzo da parte di adulti e adolescenti.<br>Utilizzo sconsigliato per bambini da 3 a 12 anni, salvo diversa indicazione medica, e fortemente sconsigliato per neonati e bambini fino a 3 anni.<br><br>Evitare il contatto di liquidi con il guanciale.<br><br>Non avvicinare al guanciale fiamme libere o altri possibili inneschi di combustione. |
| Casi in cui consultare un operatore sanitario       | Consultare un operatore sanitario al presentarsi di qualsiasi problematica alla muscolatura del collo ed in caso di ogni necessità di chiarimento in merito alle modalità di prevenzione delle stesse.   |

Per quanto non esplicitamente dichiarato nel presente documento, incluso le modalità di installazione, movimentazione e pulizia, si rimanda al *Certificato di Garanzia e manuale d'uso*, allegato alle presenti istruzioni.

Al fine di consentire una corretta sorveglianza post-commercializzazione del dispositivo medico, si invita l'utilizzatore a segnalare immediatamente alla presente Società qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al presente prodotto.



Pistoia, 06/10/2025